

# AJL vet

## AJLVET ÖN YÜKLEMELİ KAPSÜLER GERGİ HALKASI

### FARKLI MODELLER

Ref: ACV001302PL

Açık çap: 13 mm  
Kapalı çap: 11 mm

Ref: ACV001602PL

Açık çap: 16 mm  
Kapalı çap: 14 mm



### TANIM VE ENDİKASYONLAR

UV ışınlarını engelleyen filtreye sahip polimetilmetakrilat (PMMA) malzemeden üretilmiş AJLVET kapsüller tansiyon halkaları, katarakt cerrahisi sırasında, özellikle aşağıdaki vakalarda kapsüller kesiği stabilize etmek amacıyla tasarlanmıştır:

- Primer veya sekonder zonüler zayıflık
- Parsiyel zonulolizis
- Travma
- Psödoeksfolyasyon sendromu
- Kapsüller retraksiyon riski (örneğin üveit)

Sadece veteriner hekimlik kullanımı içindir

### KULLANIM TALİMATLARI

1. Paketi açınız ve enjektörü çıkarınız. (Şekil 1)
2. Halkayı enjektöre tamamen yerleştirilene kadar tekerleği ileri doğru çevirin (Şekil 2)
3. Enjektörün kilidini açmak için sekmeyi merkeze doğru kaydırın (Şekil 3)
4. Enjektör ucunu kapsüller kese içine dikkatlice yerleştirin (Şekil 4) ve halkayı yumuşak ve kontrollü bir şekilde serbest bırakmak için tekerleği geri doğru çevirin.
5. Halka kancadan kendiliğinden ayrılacaktır.
6. Kanca geri çekilene kadar tekerleği ileri doğru çevirin ve ardından enjektörü gözden çıkarın.

